


Vision Cyto[®] Basic

Рабочее место врача-цитолога

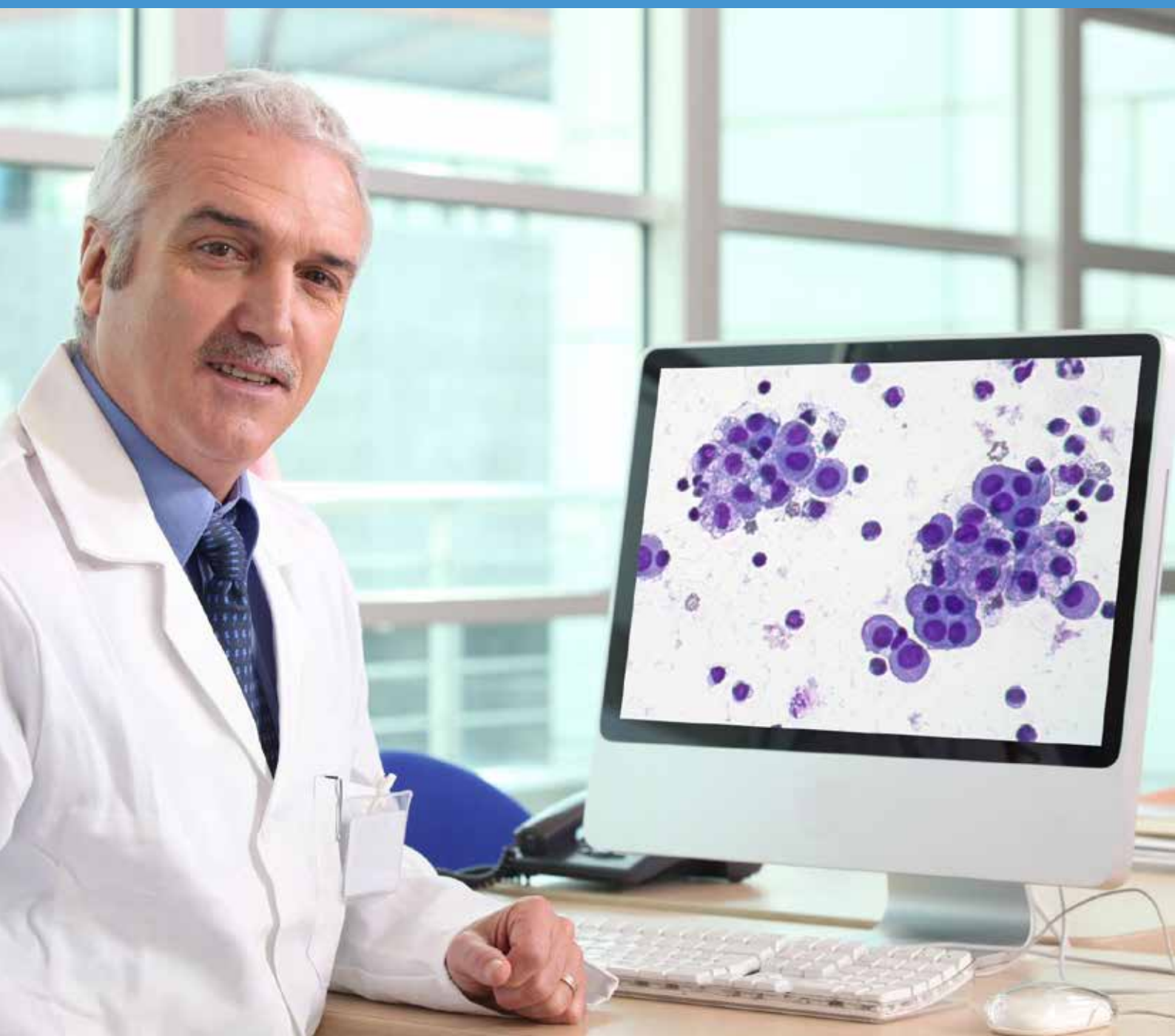


Цифровая цитология

Организация и интерпретация цитологических исследований


Подсказки из атласа

Развивайте свои профессиональные знания путем создания и ведения атласа. Добавляйте в атлас изображения с комментариями для последующего использования.

Вагинальный мазок

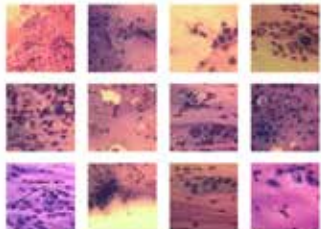



Кожа

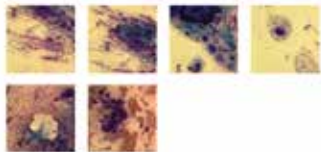

Отпечаток с уретры



Мокрота

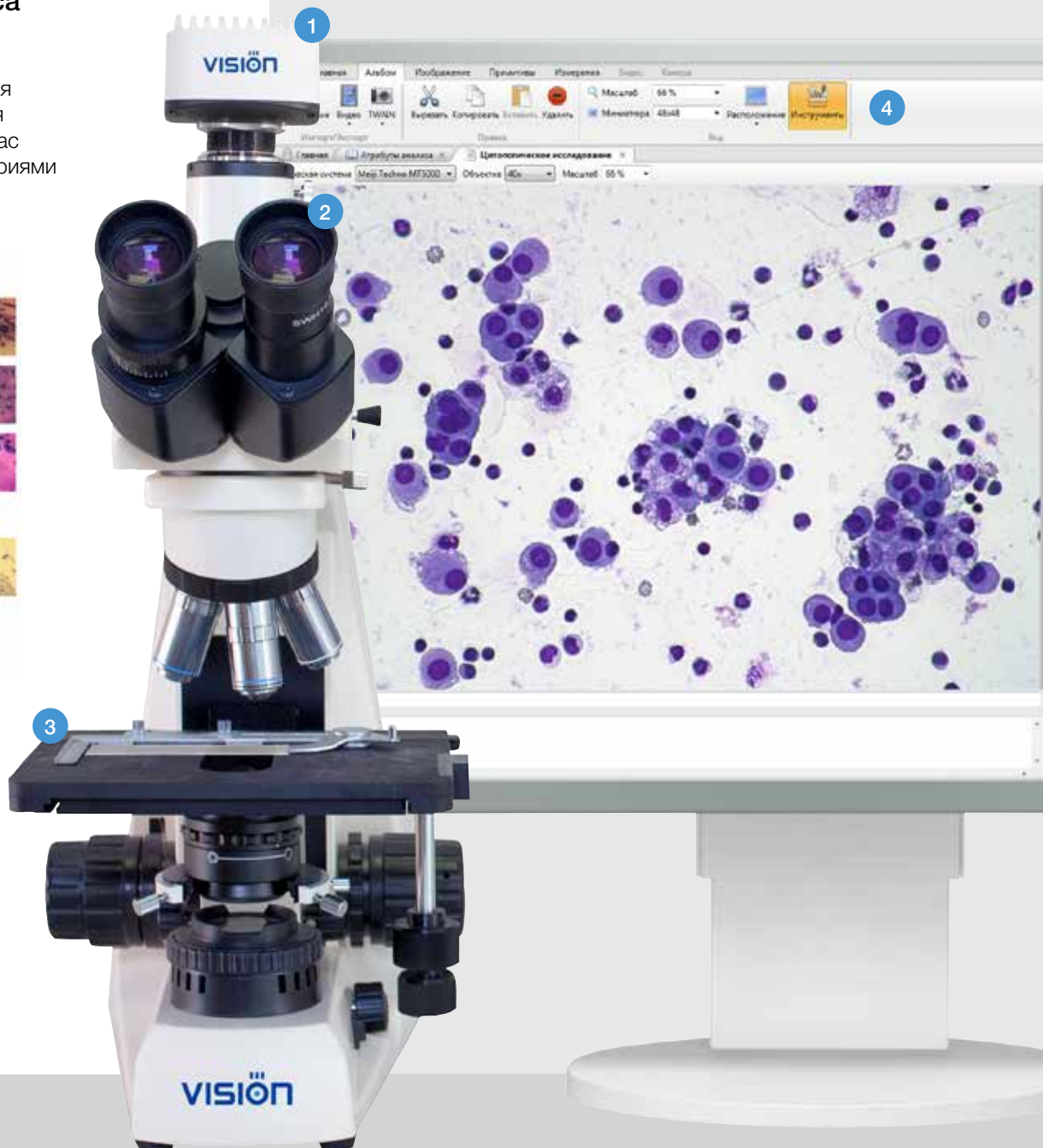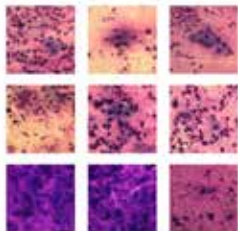

1 Цифровая камера


Высокое разрешение и идеальная цветопередача обеспечивают превосходное изображение цитологического препарата.

2 Оптическая система

Сочетание инновационной технологии и классической микроскопии расширяет возможности работы. При необходимости цитологический препарат можно посмотреть через окуляры.

3 Микроскопия препарата

Находите необходимые объекты на цитологическом препарате в видеорежиме и захватывайте их цифровое изображение.

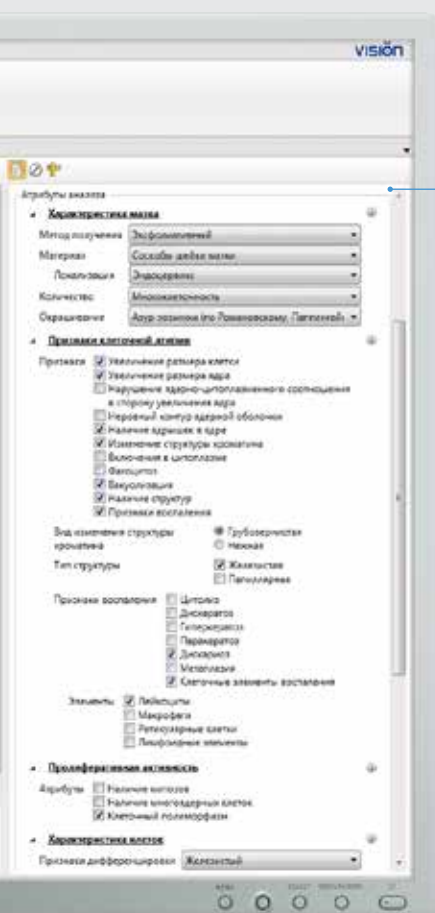

4

Простой интерфейс

Панель управления построена согласно алгоритму анализа, гарантирует соблюдение всех этапов исследования для получения достоверного результата. Занимает минимум места, сохраняя пространство для работы с изображениями.

Предустановленный алгоритм цитологического анализа

Незаменимый помощник предлагает исследователю стандартизованный алгоритм цитологического исследования. Поднимите качество проведения цитологических исследований на новый уровень.

Атрибуты анализа

Характеристика мазка

Метод получения: Эксфолиативный

Материал: Соскобы шейки матки

Локализация: Эндоцервикс

Количество: Множественность

Окрашивание: Азур-розином (по Романовскому, Паппенгейм)

Признаки клеточной атипии

Признаки: ☒ Увеличение размера клетки, ☒ Увеличение размера ядра, ☐ Нарушение ядерно-цитоплазматического соотношения в сторону увеличения ядра, ☐ Неровный контур ядерной оболочки, ☒ Наличие ядрышек в ядре, ☐ Изменение структуры хроматина, ☐ Включения в цитоплазме, ☐ Фагоцитоз, ☒ Вакуолизация, ☒ Наличие структур, ☒ Признаки воспаления

Вид изменения структуры хроматина: ☒ Грубозернистая, ☐ Нежная

Тип структуры: ☒ Железистая, ☐ Папиллярная

Признаки воспаления: ☐ Цитолиз, ☐ Дискератоз, ☐ Гиперкератоз, ☐ Паракератоз, ☒ Дискариоз, ☐ Метоплазия, ☒ Клеточные элементы воспаления

Элементы: ☒ Лейкоциты, ☐ Макрофаги, ☐ Ретикулярные клетки, ☐ Лимфоидные элементы

Проплиферативная активность

Атрибуты: ☐ Наличие митозов, ☐ Наличие многоядерных клеток, ☒ Клеточный полиморфизм

Характеристика клеток

Признаки дифференцировки: Железистый

Характеристика ядер

Признаки дистрофии и некролиза: ☐ Кариорексис, ☐ Кариопикноз, ☐ Кариолизис

Характеристика ядрышек

Количество: 1-2

Характеристика фона

Наличие клеточного детрита: Нет

Цитологический альбом диагнозов


Интерпретация результата: Железистая гиперплазия Шаблоны

Примечания: Необходимо динамическое наблюдение Шаблоны

Диагнозы: Диагноз Поставлен Снят


Поставленные диагнозы: Новый

Стандартизация и качество ваших исследований

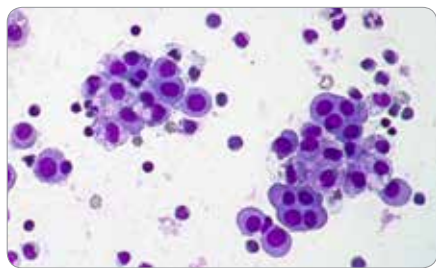

Удобная организация и профессиональные инструменты

Удобная работа с цифровыми препаратами. Находите необходимые объекты на цитологическом препарате в видеорежиме и захватывайте их цифровое изображение.

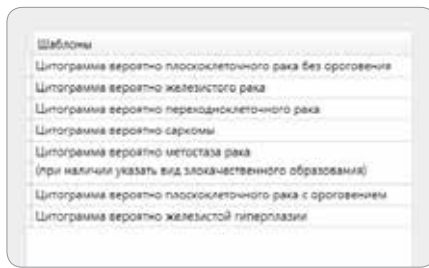

Цитологический альбом диагнозов

Шаблоны диагнозов позволяют значительно экономить время при проведении анализа. Самые распространенные заключения уже есть в системе. Вы также можете добавлять свои шаблоны по мере необходимости.



Создание отчетов

Стандартизованные бланки позволят специалистам сделать отчет о результатах цитологического исследования, не затрачивая времени на бумажную работу.

V-Chromer® II — универсальный автоматический стейнер для окраски микроскопических препаратов



Предустановленные стандартизированные окраски:

- Май-Грюнвальд-Гимза (Романовский-Гимза)
- Панооптическая окраска
- Грам
- Циль-Нильсен

Hettich Rotofix 32A — цитологическая центрифуга



Одновременное приготовление до 6 слайдов / 24 цитологических препаратов

Универсальная, надежная настольная цитологическая центрифуга, незаменимая как для лабораторий, так и для частной практики или небольших клиник.

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру



VISION

www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Щереметьевская, 85, стр. 2,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com